

# CAROSPEED®

Die Handbedienung für  
Gas und Bremse




 **auto**  
**ADAPT**  
for your independence

IDEEN FÜR MEHR LEBENSQUALITÄT

## Richtiges Fahrgefühl

Carospeed ist ein von Hand kontrolliertes Beschleunigungs- bzw. Bremssystem für Fahrer, die nicht in der Lage sind, die Pedals mit den Füßen bedienen zu können. Die Beschleunigungs bzw. Bremsfunktionen werden durch einen Hebel übertragen, der sich seitlich vom Fahrersitz befindet. Bewegen Sie den Hebel nach hinten, beschleunigt das Fahrzeug, drücken Sie den Hebel nach vorne, so bremst es. So einfach ist das. Carospeed vermittelt dem Fahrer das richtige Fahrgefühl. Das Geheimnis liegt in der Geometrie des Hebels und in der grossen Erfahrung unseres Unternehmens im Umbau von Fahrzeugen.

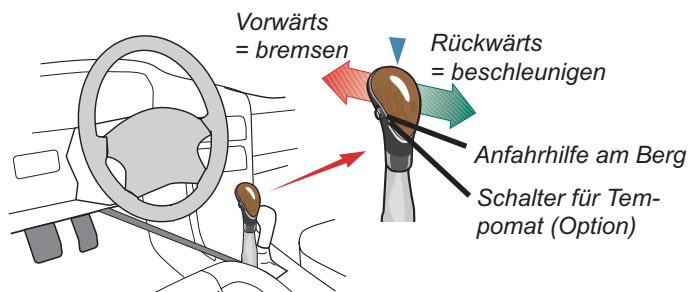

## Anfahrhilfe am Berg

Der Kontrollhebel ist mit einer Anfahrhilfe in der Standardversion ausgestattet. Sie verhindert das Anfahren des Fahrzeugs wenn der Fahrer die Hand von der Bremse zum Gangschalter bewegt.

## Schalter für Tempomat

Um zu vermeiden, dass die Hand ständig am Schalthebel verbleibt wenn Sie weitere Entfernungen zurücklegen, ist der Kontrollhebel so vorbereitet, dass er an den im Fahrzeug vorhandenen Tempomat angeschlossen werden kann. Er wird mit dem gleichen Schalter wie für die Anfahrhilfe betätigt und automatisch unterbrochen, wenn gebremst wird.

## Ergonomisches Design

Carospeed ist eine ergonomisch entworfene Hilfe für behinderte Personen. Sie ist das Ergebnis jahrelanger Erfahrung im Entwurf und der Herstellung von Fahrzeugumbauten für diese Personengruppe. Das Erfordernis eines einfachen Einbaus und die Vermittlung eines echten Fahrgefühls hat uns bei der Entwicklung motiviert.



Carospeed ist ein vielseitiges Instrument, welches in fast alle Fahrzeuge eingebaut werden kann, sei es dass, sie rechts oder links gesteuert werden. Carospeed ist am Fahrzeugboden mit Fahrersitz sowie Brems- und Gaspedal verbunden.

## CAROSPEED®

Anfahrhilfe am Berg in Verbindung mit Tempomat



CAROSPEED®




Schwarzer Handgriff mit grauer Abdeckung.



Holzhandgriff mit natürlicher Holzoptik.



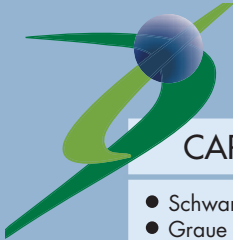

## Produktinformation

CAROSPEED	CAROSPEED E	CAROSPEED T	CAROSPEED TE
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Schwarzer Griff</li> <li>● Graue Abdeckung</li> <li>● Anfahrhilfe</li> <li>● Schaltknopf für Tempomat (Option)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Schwarzer Griff</li> <li>● Graue Abdeckung</li> <li>● Anfahrhilfe</li> <li>● Schaltknopf für Tempomat (Option)</li> <li>● Elek. Funktionhilfe</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 2 verschiedene Handgriffvarianten</li> <li>● Graue Abdeckung</li> <li>● Anfahrhilfe</li> <li>● Schaltknopf für Tempomat (Option)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 2 verschiedene Handgriffvarianten</li> <li>● Graue Abdeckung</li> <li>● Anfahrhilfe</li> <li>● Schaltknopf für Tempomat (Option)</li> <li>● Elek. Funktionhilfe</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Holz/Schwarz Griff</li> <li>● Graue Abdeckung</li> <li>● Anfahrhilfe</li> <li>● Schaltknopf für Tempomat (Option)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Holz/Schwarz Griff</li> <li>● Graue Abdeckung</li> <li>● Anfahrhilfe</li> <li>● Schaltknopf für Tempomat (Option)</li> <li>● Elek. Funktionhilfe</li> </ul>	<b>CAROSPEED INDICATOR</b>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>● Schwarzer Griff</li> <li>● Graue Abdeckung</li> <li>● Anfahrhilfe</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Richtungsanzeiger</li> <li>● Schaltknopf für Tempomat (Option)</li> </ul>

Folgende Forderungen sind erfüllt: ISO/TC22 N 2072, 74/60/EEC, 78/632/EEC, 95/54/EC, VVFS1994:5

## Zubehörteile

**LENKHILFE**  
Um das Fahren mit einer Hand zu erleichtern.

**TEMPOMAT**  
Wenn das Fahrzeug mit einem Tempomat ausgerüstet ist kann er in den Handgriff integriert werden.

**ARMSTÜTZE**  
Die Armstütze erleichtert den Druck auf die Arme und macht das Fahren bequemer.

**BREMSPEDAL-ABDECKUNG**  
Um die Sicherheit zu erhöhen, ist eine Bremspedalabdeckung erhältlich. Sie verhindert, dass sich der Fuß des Fahrers unter dem Pedal verklemmt.

**MONTAGEKONSOLE**  
Die Montagekonsole wird in den Bolzenlöchern am Vordersitz verankert. Modellspezifische Konsolen sind erhältlich.

Mehr  
Informationen  
unter  
[www.autoadapt.de](http://www.autoadapt.de)



### Autoadapt AB

Hedeforsvägen 6  
S-443 61 Stenkullen, Schweden  
Tel: +46(0)302 55820  
Fax: +46(0)302 55829  
E-mail: [contact@autoadapt.se](mailto:contact@autoadapt.se)  
[www.autoadapt.de](http://www.autoadapt.de)    [www.autoadapt.com](http://www.autoadapt.com)

